


3. Monteringsanvisning

Sängstativ "Anna" Art nr 1006

Sänk ner stången i sänggavelns hål tills fästet med korsvredet går ner i gavelns hål. Placera fästets fyrkantsmutter i sänggavelhålets spår.

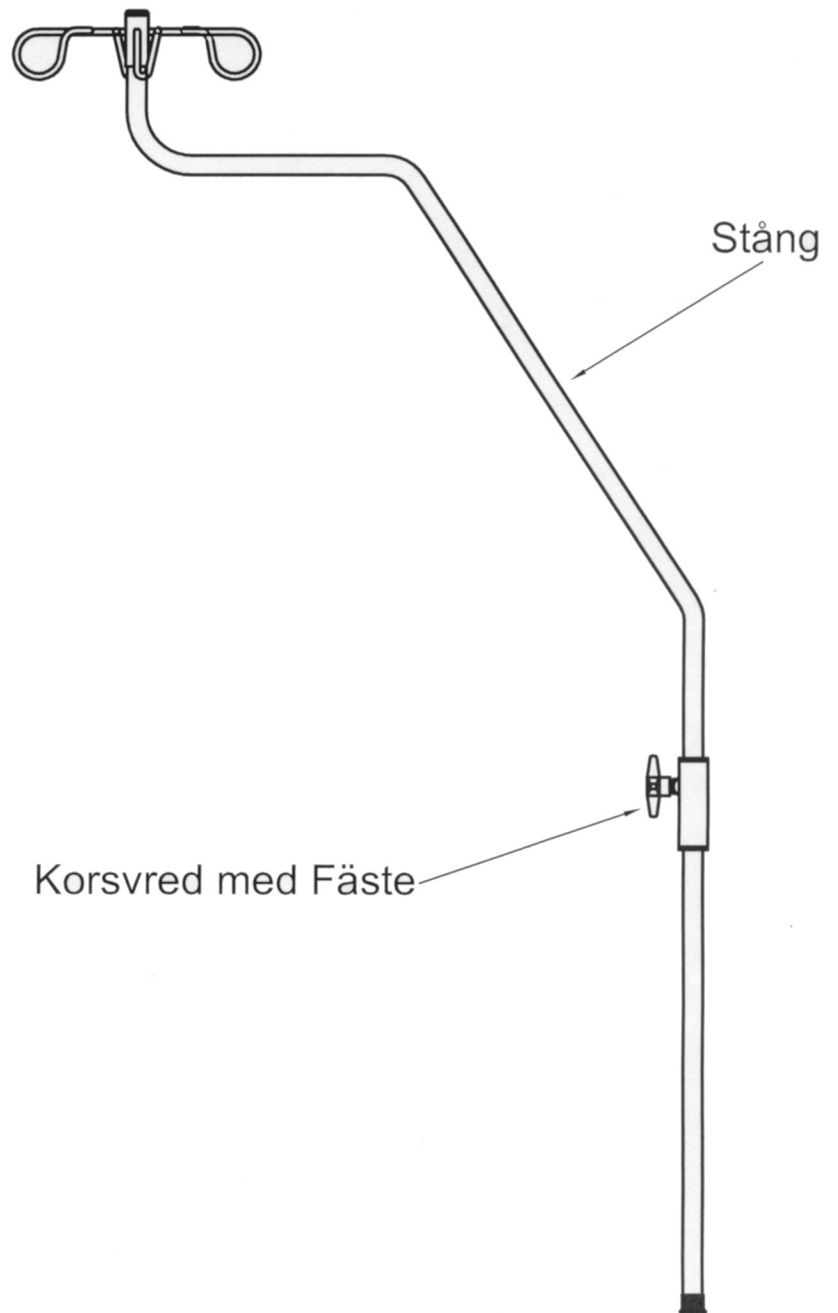

4 Anvisningar för handhavande

Sängstativ “Anna” Art nr 1006

4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1006 är ett sänggavelmonterat stativ som är avsett att bära droppåsar/-flaskor

- **Höjd- / riktningsjustering**

Håll i droppstängens och öppna korsvredet när du vill justera höjden eller riktningen på stängens, **lås därefter med korsvredet.**



4.2 Max belastning

Påsar / flaskor på krona: 3 kg



4 Anvisningar för handhavande (forts.)

Sängstativ "Anna" Art nr 1006

4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
Kontrollera att krokar för droppåsar sitter fast
Kontrollera låsningen för svängning och höjjustering av droppstången
- **Rengöring**
Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.



7. Försäkran om överensstämmelse

Sängstativ Anna Art nr 1006

EG-försäkran om överensstämmelse

Typ av produkt: Infusionsstativ
Fabrikat: Johlins Sweden AB
Varumärke: Johlins

Tillverkare: Johlins Sweden AB
Movägen 13
671 70 Edane

Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten överensstämmer med följande föreskrifter och lagar:

- LVFS 2003:11 “Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter”
- Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

Edane 14.02.03



Stefan Höiseth

Verkställande direktör