


### 3. Monteringsanvisning

Sängstativ "Marie" Art nr 1008

Sänk ner stången i sänggavelns hål tills fästet med korsvredet går ner i gavelns hål. Placera fästets fyrkantsmutter i sänggavelhålets spår.

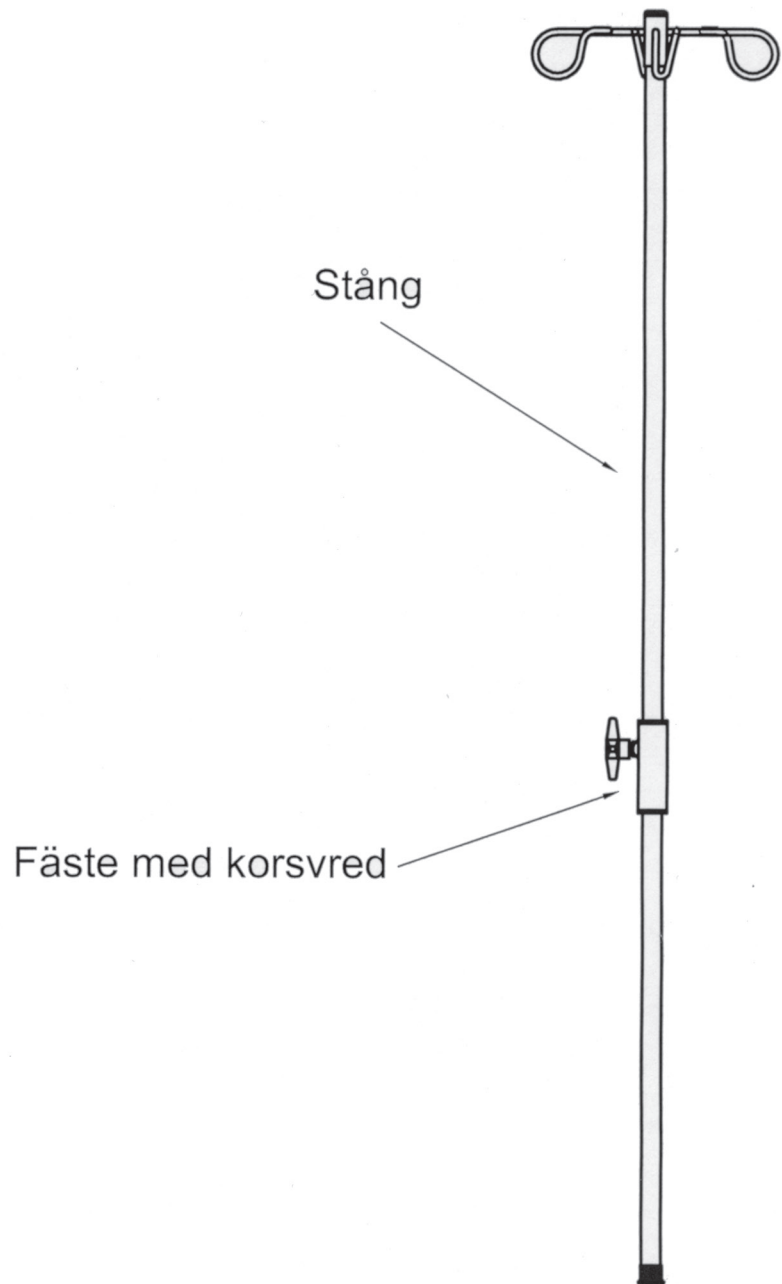

## 4 Anvisningar för handhavande

### Sängstativ “Marie” Art nr 1008

#### 4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1008 är ett sänggavelmonterat stativ som är avsett att bära droppåsar/-flaskor

- **Höjd- / riktningsjustering**

Håll i droppstången och öppna korsvredet när du vill justera höjden, lås därefter med korsvredet.



#### 4.2 Max belastning

**Påsar / flaskor på krona: 3 kg**



## 4 Anvisningar för handhavande (forts.)

Sängstativ “Marie” Art nr 1008

### 4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**  
Kontrollera att krokar för droppåsar sitter fast  
Kontrollera låsningen för höjjustering av droppstången
- **Rengöring**  
Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.



## 7. Försäkran om överensstämmelse

Sängstativ Marie Art nr 1008

### EG-försäkran om överensstämmelse

**Typ av produkt:** Infusionsstativ  
**Fabrikat:** Johlins Sweden AB  
**Varumärke:** Johlins

**Tillverkare:** Johlins Sweden AB  
Movägen 13  
671 70 Edane

Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten överensstämmer med följande föreskrifter och lagar:

- LVFS 2003:11 “Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter”
- Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

Edane 14.02.03



**Stefan Höiseth**

**Verkställande direktör**