

Monteringsanvisningar

Dränagestativ Ingrid Art nr 1004

Uppackning

Stativet levereras i 3 delar med droppstång monterad i stolpe och t-spårfäste på stolpen. Hjulen är monterade på foten. Dränagefäste.

Steg 1

För ner överdelen i hylsan på foten.

Steg 2

Skruva fast med medföljande insexnyckel.

Steg 3

För ner dränagefästet i t-spårfästet.

Klart!



Anvisningar för handhavande

Dränagestativ Ingrid Art nr 1004

Användning

Användningsområde

Artikel nr 1004 är ett stativ som är avsett att bära droppåsar alternativt flaskor samt ett dränagefäste och som är möjligt att förflyttas av patienten själv med dropp inkopplat.

Höjdjustering

Höjdjustering sker genom att öppna korsvredet, ta tag i droppstången och justera den till önskad nivå varefter korsvredet dras åt igen.

Förflyttning

Vid förflyttning bör man hålla i droppstången alt. styrhandtag. Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.

Låsning

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

MAX belastningar

Påsar/flaskor på krona: 3kg

Dränagefäste: 3kg

Underhåll

Funktionskontroll (minst en gång per år)

Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast på foten.

Kontrollera att krokarna för droppåsar sitter fast.

Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.

Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen.

Kontrollera låsningen för höjdjustering av droppstången.

Rengöring

Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.

