

# Monteringsanvisningar

## Apparatstativ Remus Art nr 1042

### Uppackning

Stativet levereras i 2 delar med krona och droppstång monterade på stolpen samt med hjulen monterade på foten.

### Steg 1


Sätt ner stolpen i stativfoten.

OBS! Det är viktigt att stolpen bottenar i fotens låshylsa.

### Steg 2

Lås fast stolpen på foten genom att dra åt låshylsans skruv med medföljande insexnyckel.

**Klart!**

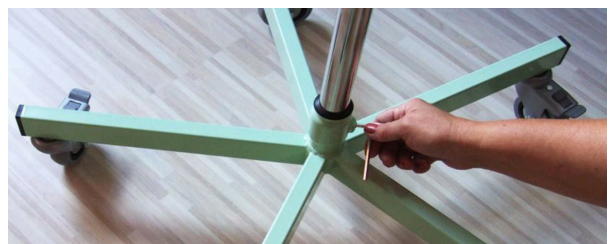

# Anvisningar för handhavande

## Hygienstation Remus Art nr 1042

### Användning

#### Användningsområde

Artikel nr 1042 är ett stativ som är avsett att bära hygienartiklar.

#### Förflyttning

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning.

#### Låsning

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

### MAX belastningar

15kg

### Underhåll

#### Funktionskontroll (minst en gång per år)

Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.

Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.

Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen.

#### Rengöring

Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.

