



Produktdokumentation
BENSTATIV "ÅKE"
Artikel nr 1028

Innehållsförteckning

- 3 Allmän produktbeskrivning
- 4 Monteringsanvisning
- 5 Anvisningar för handhavande
 - Användning
 - MAX belastning
 - Underhåll
- 6 Riskhantering
 - Riskanalys
 - Stabilitetstest
- 6 Märkning och spårbarhet
- 6 Kontaktuppgifter

Inledning

Tack för att ni köpt stativ från Johlins!

Denna produktdokumentation innehåller den information som behövs för att montera, använda och underhålla ert nya stativ.

Läs därför igenom dokumentationen noggrant innan stativet tas i bruk, detta för att undvika onödiga misstag vid montering och handhavande.

Även om infusionsstativ anses vara produkter som inte är förenade med några speciella risker ska ändå hänsyn tas till de risker som pekas på i riskanalysen.

Johlins stativ har 3 års garanti förutsatt att anvisningarna för montering och handhavande följts och ingen yttre åverkan förekommit.

Allmän produktbeskrivning

Benstativ Åke Art nr 1028

- Åke är ett lyft hjälpmedel vid ingrepp i ben och armar.
- Grovinställning av arbetshöjd sker med stativets höjdjustering varefter fortsatt justering sker med hjälp av operationsbordets egen höjdjustering.
- Höjd justerbar 1120–1960mm (från golv till fästögla).
- Höjd till lyftstropp (tillbehör) 500-1370mm.
- Stativfot med fyra hjul diameter 75mm varav två är låsbara.
- Övre stång är förzinkad.
- Vikt: 16,5kg.
- Målade ytor är pulverlackerade, standard vit RAL9010.
- Annan färg mot en kostnad.



Monteringsanvisningar

Benstativ Åke Art nr 1028

Uppackning

Stativet levereras i 2 delar med övre stång monterad.

Montering

Sätt stolpen i fästet på foten och dra åt med den medföljande insexnyckeln

Klart!



Anvisningar för handhavande

Benstativ Åke Art nr 1028

Användning

Användningsområde

Artikel nr 1028 är ett lyfthjälpmedel avsett att användas i kombination med operationsbord vid ingrepp i ben och armar.

Grovinställning av höjd

Övre stängens justeras genom att öppna låshylsan och lyfta den till lämplig höjd.

Inställning av patientläge

Justering av höjd på ben eller arm sker med operationsbordets egen höjdjustering.

Låsning av fot

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

MAX belastningar

Fästöglan får belastas med max 20kg.



Underhåll

Funktionskontroll (minst en gång per år)

Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast på foten.
Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen.

Rengöring

Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.

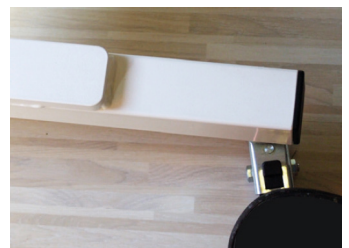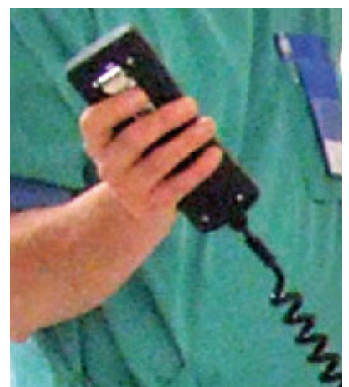

Riskhantering

Benstativ Åke Art nr 1028

För att identifiera möjliga risker i användningen av stativ och att åtgärda dessa risker i möjligaste mån upprättar Johlins riskanalyser och genomför stabilitetstester för samtliga modeller av stativ.

Riskanalys & stabilitetstest

Riskanalys för detta stativ är gjord, och visar bra stabilitet för användningsområdet.

Registreringsuppgifter hos Läkemedelsverket:

PIDProduct: 101338

Artikelnr: 1028

Produktklass: MDR Klass 1

GMDN: 40509

Märkning & spårbarhet

Benstativ Åke Art nr 1028

CE - etiketten innehåller artikelnummer / -namn, tillverkningsdatum, våra kontaktuppgifter samt uppgifter om maxbelastningar.

Strekkod-etiketten innehåller även UDI/Batch-nummer.