



Produktdokumentation

STICKSTATIV "CHARLIE"

Artikel nr 1032

Innehållsförteckning

- 3 Allmän produktbeskrivning
- 4 Monteringsanvisning
- 5 Anvisningar för handhavande
 - Användning
 - MAX belastning
 - Underhåll
- 6 Riskhantering
 - Riskanalys
 - Stabilitetstest
- 6 Märkning och spårbarhet
- 6 Kontaktuppgifter

Inledning

Tack för att ni köpt stativ från Johlins!

Denna produktdokumentation innehåller den information som behövs för att montera, använda och underhålla ert nya stativ.

Läs därför igenom dokumentationen noggrant innan stativet tas i bruk, detta för att undvika onödiga misstag vid montering och handhavande.

Även om stativ anses vara produkter som inte är förenade med några speciella risker ska ändå hänsyn tas till de risker som pekas på i riskanalysen.

Johlins stativ har 3 års garanti förutsatt att anvisningarna för montering och handhavande följts och ingen yttre åverkan förekommit.

Allmän produktbeskrivning

Stickstativ Charlie Art nr 1032

Stickstativet Charlie erbjuder en smidig och praktisk arbetsmiljö vid vård av, och provtagning på, sängliggande patienter.

- Rostfri basstolpe diameter 28mm.
- Styrhandtag.
- 5-hjulig stativfot diameter 560mm.
- 5 hjul diameter 75mm, varav 2 låsbara.
- 3 dubbla T-spårsfästen.
- Rostfri avlastningsbricka.
- Rostfri avlastningskorg.
- Rostfri tillbehörskorg.
- Rostfri hållare för riskavfallsburk.
- Rostfri hållare för avfallspåse.
- Vikt: 8,7kg.
- Standard färg rubinröd RAL 3003.
- Annan färg mot en kostnad.




Monteringsanvisningar

Stickstativ Charlie Art nr 1032

Uppackning

Stativet levereras i 7 delar med basstolpen komplett monterad med T-spårsfästen, hjulen monterade på foten samt avlastningsbricka, avlastningskorg, tillbehörskorg, hållare för risk-avfallsburk och hållare för avfallspåse.

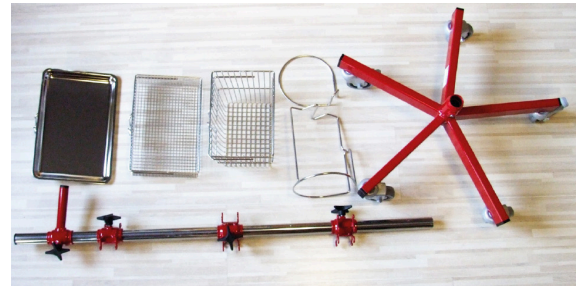


Steg 1

Sätt ner stolpen i stativfoten.

OBS! Det är viktigt att stolpen bottenar i låshylsan.

Dra åt insexskruven med medföljande nyckel.

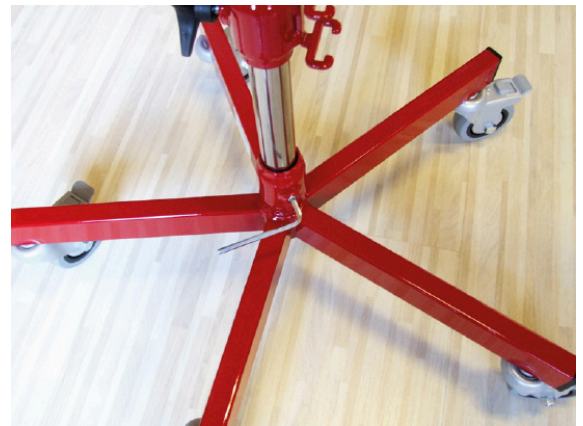

Steg 2

Ställ stativet upp och montera hållare, korgar och bricka genom att sätta ner deras fästbygel i T-spårsfästena.

Klart!



Anvisningar för handhavande

Stickstativ Charlie Art nr 1032

Användning

Användningsområde

Artikel nr 1032 är ett stativ som är avsett att ge en praktisk arbetsmiljö vid vård av, och provtagning på, sängliggande patienter.

Förflyttning

Vid förflyttning bör man hålla i styrhandtaget. Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning.

Låsning

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

MAX belastningar

Varje korg, bricka och hållare får belastas med MAX 1kg.

Underhåll

Funktionskontroll (minst en gång per år)

Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast på foten.
Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen.

Rengöring

Stativets lackerade delar bör rengöras regelbundet med anti-septiskt medel. Korgar, hållare och bricka kan maskindiskas.



Riskhantering

Stickstativ Charlie Art nr 1032

För att identifiera möjliga risker i användningen av stativ och att åtgärda dessa risker i möjligaste mån upprättar Johlins riskanalyser och genomför stabilitetstester för samtliga modeller av stativ.

Riskanalys & stabilitetstest

Riskanalys för detta stativ är gjord, och visar bra stabilitet för användningsområdet.

Registreringsuppgifter hos Läkemedelsverket:

PIDProduct: 101338

Artikelnr: 1032

Produktklass: MDR Klass 1

GMDN: 40509

Märkning & spårbarhet

Stickstativ Charlie Art nr 1032

CE - etiketten innehåller artikelnummer / -namn, tillverkningsdatum, våra kontaktuppgifter samt uppgifter om maxbelastningar.

Strekkod-etiketten innehåller även UDI/Batch-nummer.