



Produktdokumentation

APPARATSTATIV "IDA"

Artikel nr 1011

Innehållsförteckning

- 3 Allmän produktbeskrivning
- 4 Monteringsanvisning
- 5 Anvisningar för handhavande
 - Användning
 - MAX belastning
 - Underhåll
- 6 Riskhantering
 - Riskanalys
 - Stabilitetstest
- 7 Märkning och spårbarhet
- 7 Kontaktuppgifter

Inledning

Tack för att ni köpt stativ från Johlins!

Denna produktdokumentation innehåller den information som behövs för att montera, använda och underhålla ert nya stativ.

Läs därför igenom dokumentationen noggrant innan stativet tas i bruk, detta för att undvika onödiga misstag vid montering och handhavande.

Även om infusionsstativ anses vara produkter som inte är förenade med några speciella risker ska ändå hänsyn tas till de risker som pekas på i riskanalysen.

Johlins stativ har 3 års garanti förutsatt att anvisningarna för montering och handhavande följts och ingen yttre åverkan förekommit.

Allmän produktbeskrivning

Apparatstativ Ida Art nr 1011

- Infusionsstativ för upp till fyra pumpar/aggreat och droppåsar.
- Fyra inåtböjda säkra krokar för droppåsar.
- Droppstång av rostfritt material diameter 19mm.
- Rostfria fäströr, diameter 25mm, monterade på IVA-skena med kolvar.
- Nedre stolpe är rostfri. Diameter 30mm.
- Höjden är inställbar 1470-2500mm (golv till krokar).
- Styrhandtag reglerbart i höjddled.
- Fäste för kontaktdosa för 6 uttag, 3,5m sladd.
- Femhjulig stativfot med en diameter av 650mm.
- Lätt rullande länkhjul med en diameter av 75mm.
- 2 låsbara hjul.
- Standardfärger ljusgrön RAL 6019 alternativt vit RAL 9010.
- Annan färg mot en kostnad.
- Vikt: 15kg.



Monteringsanvisningar

Apparatstativ Ida Art nr 1011

Uppackning

Stativet levereras i 2 förpackningar. Krona och droppstång monterade på stolpen samt med hjulen monterade på foten. Övriga delar lösa för eget montage.

Steg 1

Montera IVA-skenan på nedre stolpen genom att dess låshylsa träs på nerifrån. Förflytta den relativt högt upp på stolpen. IVA-skenans fasade kant ska vändas uppåt.

Steg 2

Trä därefter på styrhandtaget.

Steg 3

Trä på hållaren för kontaktdosa. Observera att fästets "tak" ska vändas uppåt.







Steg 4

Sätt ner stolpen i stativfoten. OBS! Det är viktigt att stolpen bottenar i fotens låshylsa. Dra åt skruven med den medföljande insexnyckeln.

Steg 5

Justera höjderna på IVA-skenan, styrhandtag och kontaktdosefäste och dra åt fästhylsorna för respektive del.

Klart!

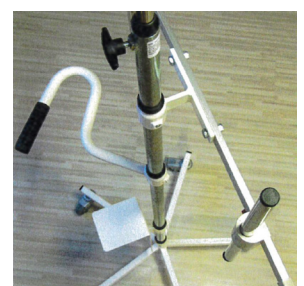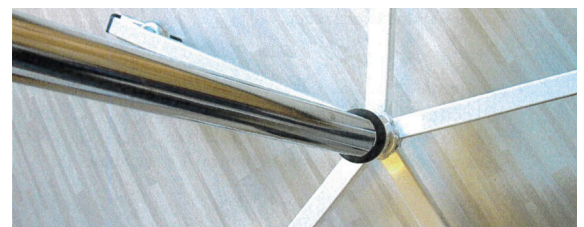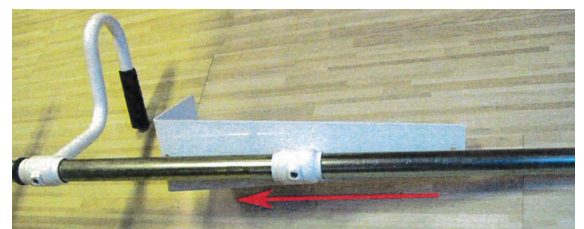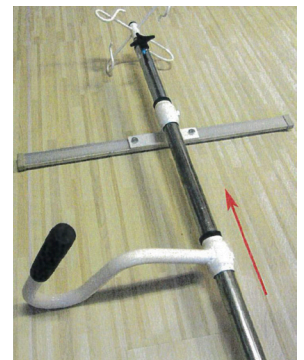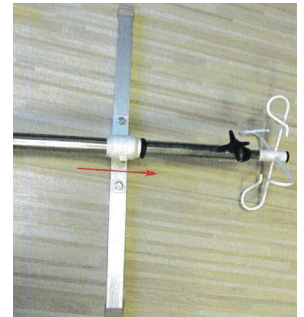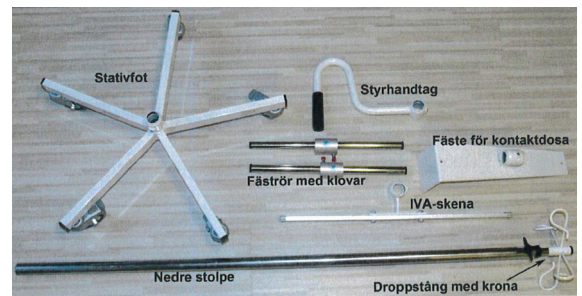

Anvisningar för handhavande

Apparatstativ Ida Art nr 1011

Användning

Användningsområde

Artikel nr 1011 är ett stativ som är avsett att bära apparater och droppåsar/flaskor.

Bestyckning

Montera pumpar och andra typer av apparater på stativets fäströr/IVA-skena. Börja så nära mittstolpen som möjligt. Vid flera än en pump, tänk på att fördela dem på båda sidor om stolpen.

Höjjustering droppstång

Håll i övre stängeln och öppna korsvredet när du vill justera höjden, lås därefter med korsvredet.

Förflyttning

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.

Låsning

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

MAX belastningar

Apparater på fäströr: 12kg

Påsar/flaskor på krona: 3kg

Underhåll

Funktionskontroll (minst en gång per år)

Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast på foten och inte glappar i hylsan.

Kontrollera att fästhylsan på IVA-skenan är åtdragen.

Kontrollera att fästhylsan för kontaktdosefästet är åtdragen.

Kontrollera att krokarna för droppåsar sitter fast.

Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.

Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen.

Kontrollera låsningen för höjjustering av droppstången.

Rengöring

Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.



Riskhantering

Apparatstativ Ida Art nr 1011

För att identifiera möjliga risker i användningen av stativ och att åtgärda dessa risker i möjligaste mån upprättar Johlins riskanalyser och genomför stabilitetstester för samtliga modeller av stativ.

Riskanalys & stabilitetstest

Testförfarande

Stativet förses med *minst* den belastning det är avsett för i form av droppåsar och infusionspumpar. Stativet placeras på en platta med 10 graders lutning. Höjden från golv till krokar är 2 meter om inte annat specifikt anges.



Bilder av testutrustning och förfarande.

Stabilitetstest

Apparatstativ Ida Art nr 1011

Grundförutsättningar

- Stativet är placerat på ett lutande plan på 10 grader.
- Avstånd från golv till fästen för infusionspår = 2 000mm.
- 3st natriumkloridpåsar, vikt per st 1kg.
- 4st pumpar/aggreat

Testresultat

Inga tendenser till att stativet skulle tippa.

Registreringsuppgifter hos Läkemedelsverket:

PIDProduct: 25409 Infusionsstativ

Artikelnr: 1011

Produktklass: MDR Klass 1

GMDN: 40509



Märkning & spårbarhet

Apparatstativ Ida Art nr 1011

CE - etiketten innehåller artikelnummer / -namn, tillverkningsdatum, våra kontaktuppgifter samt uppgifter om maxbelastningar.

Strekkod-etiketten innehåller även UDI/Batch-nummer.