



Produktdokumentation

SPECIALSTATIV "JOHN"

För hantering av absorptionsdukar. Artikel nr 1035

Innehållsförteckning

- 3 Allmän produktbeskrivning
- 4 Monteringsanvisning
- 5 Anvisningar för handhavande
 - Användning
 - MAX belastning
 - Underhåll
- 6 Riskhantering
 - Riskanalys
 - Stabilitetstest
- 6 Märkning och spårbarhet
- 6 Kontaktuppgifter

Inledning

Tack för att ni köpt stativ från Johlins!

Denna produktdokumentation innehåller den information som behövs för att montera, använda och underhålla ert nya stativ.

Läs därför igenom dokumentationen noggrant innan stativet tas i bruk, detta för att undvika onödiga misstag vid montering och handhavande.

Även om infusionsstativ anses vara produkter som inte är förenade med några speciella risker ska ändå hänsyn tas till de risker som pekas på i riskanalysen.

Johlins stativ har 3 års garanti förutsatt att anvisningarna för montering och handhavande följts och ingen yttre åverkan förekommit.

Allmän produktbeskrivning

Specialstativ John Art nr 1035

Specialstativet John erbjuder en stabil, smidig och praktisk lösning på den viktiga hanteringen och sorteringen av nya och använda absorptionsdukar under ett kirurgiskt ingrepp.

John består av:

- Femhjulig fot med en diameter av 650mm.
- Rostfri stång, diameter 30mm.
- Höjd ca 160cm.
- Rostfri hållare för 3 sorteringspåsar på en sida.
- T-spårspåsen och styrhandtag.
- Rostfri avlastningsbricka för använda instrument. Brickan kan placeras i upp- eller nedfällt läge.
- Målade ytor är pulverlackerade, finns i färg ljusgrön RAL 6019 alt vit RAL 9010.
- Annan färg mot en kostnad.



Monteringsanvisningar

Specialstativ John Art nr 1035

Uppackning

Stativet levereras i 2 förpackningar.
Hjulen är monterade på foten.

Steg 1

Trä låshylsan/fästet för påshållaren från stolpens nedre ände. Skjuv den relativt högt på stängen.

Steg 2

Trä därefter styrhandtagets fästhylsa på stolpen.

Steg 3

Ställ stativet upp. Trä på T-spårsfästet för brickan.

Steg 4

Sätt ner stolpen i stativfoten.

OBS! Det är viktigt att stolpen bottenar i fotens låshylsa.

Dra åt insexskruven med medföljande nyckel.





Steg 5

Trä påshållaren i fästet, justera höjden.

Steg 6

Sätt brickan i T-spårsfästet, justera höjd.

Klart!

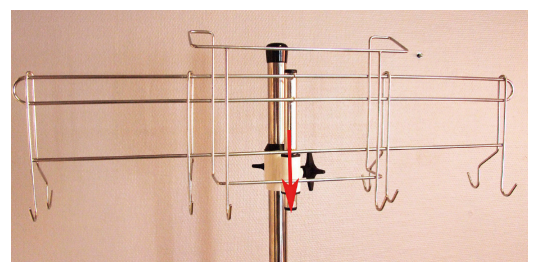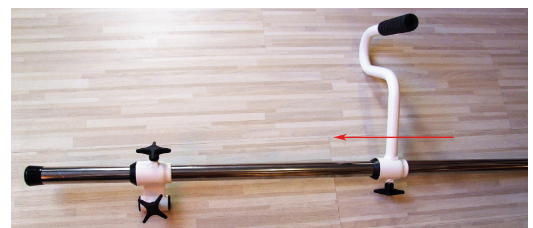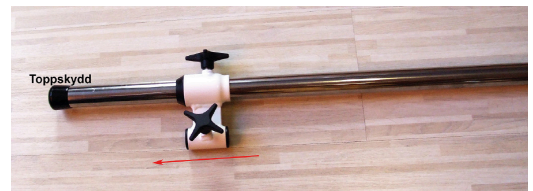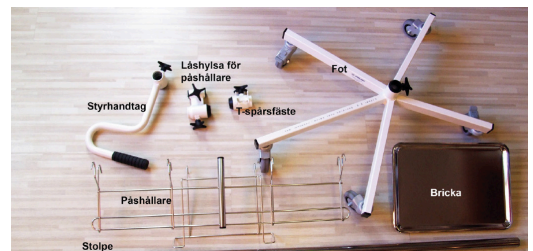

Anvisningar för handhavande

Specialstativ John Art nr 1035

Användning

Användningsområde

Artikel nr 1035 är ett stativ som är avsett att bära sorteringspåsar för absorptionsdukar.

Bestyckning

Sorteringspåsen hängs upp på hållaren.

Förflyttning

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning.

Låsning

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

MAX belastningar

Får belastas med max 15kg.

Underhåll

Funktionskontroll (minst en gång per år)

Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.

Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.

Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen

Rengöring

Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.



Riskhantering

Specialstativ John Art nr 1035

För att identifiera möjliga risker i användningen av stativ och att åtgärda dessa risker i möjligaste mån upprättar Johlins riskanalyser och genomför stabilitetstester för samtliga modeller av stativ.

Riskanalys & stabilitetstest

Riskanalys för detta stativ är gjord, och visar bra stabilitet för användningsområdet.

Registreringsuppgifter hos Läkemedelsverket:

PIDProduct: 26591 Infusionsstativ

Artikelnr: 1035

Produktklass: MDR Klass 1

GMDN: 40509

Märkning & spårbarhet

Specialstativ John Art nr 1035

CE - etiketten innehåller artikelnummer / -namn, tillverkningsdatum, våra kontaktuppgifter samt uppgifter om maxbelastningar.

Strekkod-etiketten innehåller även UDI/Batch-nummer.