



Produktdokumentation

# APPARATSTATIV "LOUISE"

Artikel nr 1009

# Innehållsförteckning

- 3 Allmän produktbeskrivning
- 4 Monteringsanvisning
- 5 Anvisningar för handhavande
  - Användning
  - MAX belastning
  - Underhåll
- 6 Riskhantering
  - Riskanalys
  - Stabilitetstest
- 7 Märkning och spårbarhet
- 7 Kontaktuppgifter

## Inledning

Tack för att ni köpt stativ från Johlins!

Denna produktdokumentation innehåller den information som behövs för att montera, använda och underhålla ert nya stativ.

Läs därför igenom dokumentationen noggrant innan stativet tas i bruk, detta för att undvika onödiga misstag vid montering och handhavande.

Även om infusionsstativ anses vara produkter som inte är förenade med några speciella risker ska ändå hänsyn tas till de risker som pekas på i riskanalysen.

Johlins stativ har 3 års garanti förutsatt att anvisningarna för montering och handhavande följts och ingen yttre åverkan förekommit.

# Allmän produktbeskrivning

## Apparatstativ Louise Art nr 1009

- Infusionsstativ för apparater och droppåsar.
- Fyra inåtböjda säkra krokar för droppåsar.
- Droppstång, diameter 19mm, av rostfritt material justeras enkelt med Johlin-Hylsan.
- Höjden är inställbar 1470-2500mm (golv till krokar).
- Rostfri stolpe diameter 30mm för montage av apparater.
- Femhjulig stativfot med en diameter av 650mm, ger bra stabilitet.
- Lätt rullande länkhjul med en diameter av 75mm.
- Låg stativfot som kan skjutas in under sängen.
- Två låsbara hjul.
- Hjulen har plåtrådsskydd som skyddar navet från smuts.
- Miljövänlig ytbehandling.
- Målade ytor är pulverlackerade, finns i färg ljusgrön RAL 6019 alt vit RAL 9010.
- Annan färg mot en kostnad.
- Vikt 12,2kg.



# Monteringsanvisningar

## Apparatstativ Louise Art nr 1009

### Uppackning

Stativet levereras i 2 delar med krona och droppstång monterade på stolpen samt med hjulen monterade på foten.

### Steg 1


Sätt ner stolpen i stativfoten.

OBS! Det är viktigt att stolpen bottenar i fotens låshylsa. Om styrhandtag ingår: för upp det på stolpen innan.

### Steg 2

Lås fast stolpen på foten genom att dra åt låshylsans skruv med medföljande insexnyckel.

**Klart!**

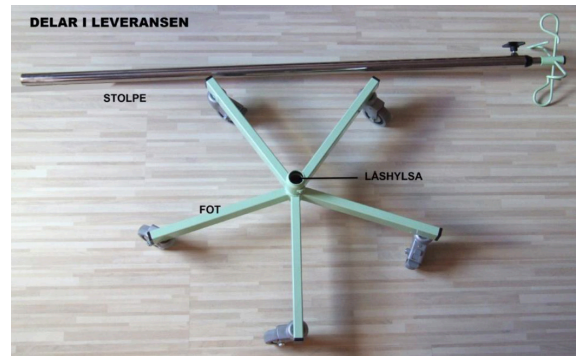

# Anvisningar för handhavande

## Apparatstativ Louise Art nr 1009

### Användning

#### Användningsområde

Artikel nr 1009 är ett stativ som är avsett att bära apparater och droppåsar/flaskor.

#### Bestyckning

Montera pumpar och andra typer av apparater på stativets stolpe, börja bestyckningen nerifrån med tyngsta enheten längst ner.

#### Höjjustering

Håll i övre stängeln och öppna korsvredet när du vill justera höjden, lås därefter med korsvredet.

#### Förflyttning

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.

#### Låsning

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

### MAX belastningar

Apparater på stolpe: 20kg

Påsar/flaskor på krona: 3kg

### Underhåll

#### Funktionskontroll (minst en gång per år)

Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.

Kontrollera att krokarna för droppåsar sitter fast.

Kontrollera att hjulen roterar och sväng er som de ska.

Kontrollera låsfunktionen på de låsbara hjulen.

Kontrollera låsningen för höjjustering av droppstången.

#### Rengöring

Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.



# Riskhantering

## Apparatstativ Louise Art nr 1009

För att identifiera möjliga risker i användningen av stativ och att åtgärda dessa risker i möjligaste mån upprättar Johlins riskanalyser och genomför stabilitetstester för samtliga modeller av stativ.

### Riskanalys & stabilitetstest

#### Testförfarande

Stativet förses med *minst* den belastning det är avsett för i form av droppåsar och infusionspumpar. Stativet placeras på en platta med 10 graders lutning. Höjden från golv till krokar är 2 meter om inte annat specifikt anges.



Bilder av testutrustning och förfarande.

# Stabilitetstest

## Apparatstativ Louise Art nr 1009

### Grundförutsättningar

- Stativet är placerat på ett lutande plan på 10 grader.
- Avstånd från golv till fästen för infusionspåsar = 2 000mm.
- 3st natriumkloridpåsar, vikt per st 1kg.
- Pumpar/aggregat monterade enligt principen tyngst längst ner. Totalt 20kg.

### Testresultat

Inga tendenser till att stativet skulle tippa.

### Registreringsuppgifter hos Läkemedelsverket:

**PIDProduct:** 25407 Infusionsstativ

**Artikelnr:** 1009

**Produktklass:** MDR Klass 1

**GMDN:** 40509

### Märkning & spårbarhet

#### Apparatstativ Louise Art nr 1009

CE - etiketten innehåller artikelnummer / -namn, tillverkningsdatum, våra kontaktuppgifter samt uppgifter om maxbelastningar.

Strekkod-etiketten innehåller även UDI/Batch-nummer.

