



Produktdokumentation

DISPLAYSTATIV "MATHIAS"

Artikel nr 1022

Innehållsförteckning

- 3 Allmän produktbeskrivning
- 4 Monteringsanvisning
- 5 Anvisningar för handhavande
 - Användning
 - MAX belastning
 - Underhåll
- 6 Riskhantering
 - Riskanalys
 - Stabilitetstest
- 7 Märkning och spårbarhet
- 7 Kontaktuppgifter

Inledning

Tack för att ni köpt stativ från Johlins!

Denna produktdokumentation innehåller den information som behövs för att montera, använda och underhålla ert nya stativ.

Läs därför igenom dokumentationen noggrant innan stativet tas i bruk, detta för att undvika onödiga misstag vid montering och handhavande.


Även om infusionsstativ anses vara produkter som inte är förenade med några speciella risker ska ändå hänsyn tas till de risker som pekas på i riskanalysen.

Johlins stativ har 3 års garanti förutsatt att anvisningarna för montering och handhavande följts och ingen yttre åverkan förekommit.

Allmän produktbeskrivning

Displaystativ Mathias Art nr 1022

- Höjdjustering 1410-1600mm (golv till mitten skärm).
- Höjdjusteringen assisteras av inbyggd gasfjädermekanism.
- Bildskärmsvinkel justerbar 0-90 grader.
- Fäste för bildskärm: VESA 75 och VESA 100.
- Diameter stativfot: 700mm.
- Hjul: 5st diameter 100mm, varav 2st låsbara.
- Avledning av statisk elektricitet via 2 antistatiska hjul.
- Vikt: 15kg.
- Standardfärg: Ljusgrå RAL 7047.
- Annan färg mot en kostnad.

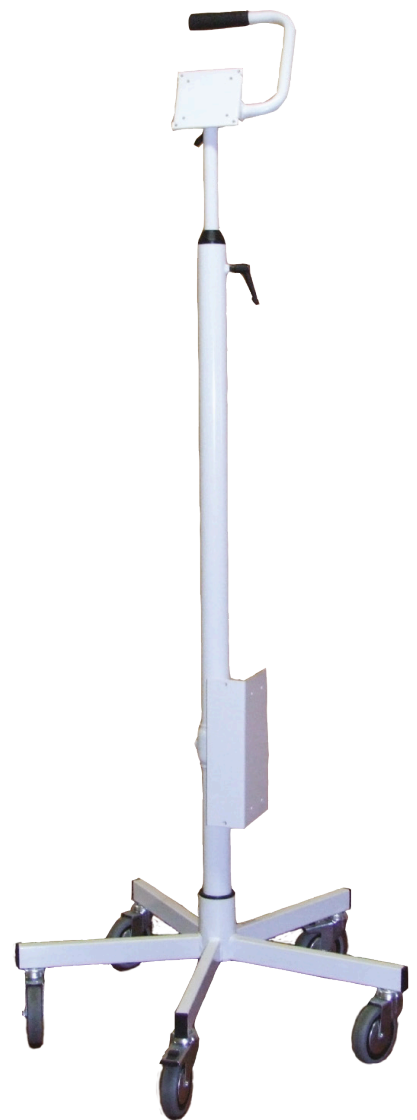

Monteringsanvisningar

Displaystativ Mathias Art nr 1022

Uppackning

Stativet levereras i 3 delar. En nedre stolpe, en övre stolpe med vesa-fäste och en fot med hjulen monterade.

Steg 1



Sätt stolpen i fotens låshylsa och dra åt låsskruven med den medföljande insexnyckeln.

Steg 2

Sätt ner övre stolpen över änden på gasfjädern och tryck ner i den nedre stolpen.

OBS! Spaken måste vara i öppet läge för att man ska kunna få ner övre stolpen. När övre stolpen är på plats dras spaken till så att den låser.

Klart!

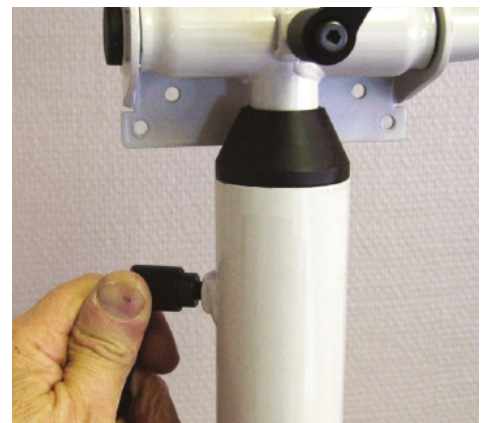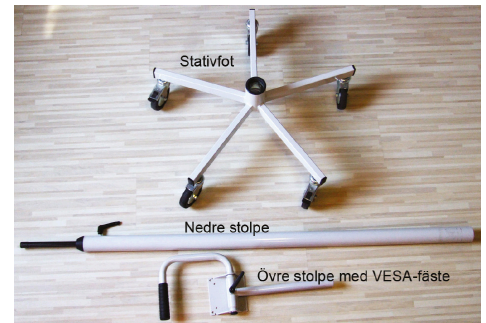

Anvisningar för handhavande

Displaystativ Mathias Art nr 1022

Användning

Användningsområde

Artikel nr 1022 är ett stativ som är avsett att användas för displayskärmar av olika slag. Displaystativet medger stor flexibilitet när det gäller placering och inställning av siktinkel. Det kan bestyckas med olika typer av video- och dataskärmar som passar i VESA-fästen. Tillbehör finns för montage av extra utrustning som t.ex. nätenhet, kontaktdon, etc.

Bestyckning

Fästplattan för bildkärm passar till både VESA 75 och VESA 100.

Höjjustering

Höjden justeras med hjälp av höjjusteringsspaken för övre stolpe.

Observera att det sitter gasfjädrar i den nedre stolpen för att underlätta höjjusteringen.

Justering av bildskärmsvinkel

Önskad vinkel ställs in med tilthandtaget. Låsning görs med justeringsspak för tiltning.

Låsning


Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

Förflyttning

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.

MAX belastningar

VESA-fäste: 14kg

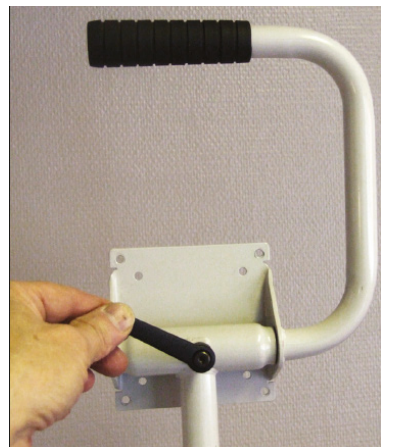

Anvisningar för handhavande

Displaystativ Mathias Art nr 1022

Underhåll

Funktionskontroll (minst en gång per år)

Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.

Kontrollera gasfjäders funktion.

Kontrollera att låsning för höjdjustering och tiltning fungerar.

Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.

Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen.

Rengöring

Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.

Riskhantering

Displaystativ Mathias Art nr 1022

För att identifiera möjliga risker i användningen av stativ och att åtgärda dessa risker i möjligaste mån upprättar Johlins riskanalyser och genomför stabilitetstester för samtliga modeller av stativ.

Riskanalys & stabilitetstest

Testförfarande

Stativet förses med *minst* den belastning det är avsett för. Stativet placeras på en platta med 10 graders lutning. Höjden från golv till mitten VESA-fäste är 1600mm.



Bilder av testutrustning och förfarande.

Stabilitetstest

Displaystativ Mathias Art nr 1022

Testresultat

Inga tendenser till att stativet skulle tippa.

Registreringsuppgifter hos Läkemedelsverket:

PIDProduct: 71010 Displaystativ

Artikelnr: 1022

Produktklass: MDR Klass 1

GMDN: 40509



Märkning & spårbarhet

Displaystativ Mathias Art nr 1022

CE - etiketten innehåller artikelnummer / -namn, tillverkningsdatum, våra kontaktuppgifter samt uppgifter om maxbelastningar.

Strekkod-etiketten innehåller även UDI/Batch-nummer.