



Produktdokumentation

HEMSJUKVÅRDSTATIV "NINA"

Artikel nr 1016

Innehållsförteckning

- 3 Allmän produktbeskrivning
 - 4 Monteringsanvisning
 - 5 Anvisningar för handhavande
 - Användning
 - MAX belastning
 - Underhåll
 - 6 Riskhantering
 - Riskanalys
 - Stabilitetstest
 - 7 Märkning och spårbarhet
- Kontaktuppgifter

Inledning

Tack för att ni köpt stativ från Johlins!

Denna produktdokumentation innehåller den information som behövs för att montera, använda och underhålla ert nya stativ.

Läs därför igenom dokumentationen noggrant innan stativet tas i bruk, detta för att undvika onödiga misstag vid montering och handhavande.

Även om infusionsstativ anses vara produkter som inte är förenade med några speciella risker ska ändå hänsyn tas till de risker som pekas på i riskanalysen.

Johlins stativ har 3 års garanti förutsatt att anvisningarna för montering och handhavande följts och ingen yttre åverkan förekommit.

Allmän produktbeskrivning

Hemsjukvårdstativ Nina Art nr 1016

- Infusionsstativ för droppåsar.
- Fyra inåtböjda krokar för droppåsar. Pulverlackerad med RAL 9006.
- Droppstång av rostfritt material diameter 19mm.
- Nedre stolpe är pulverlackerad med RAL 9006. Diameter 28mm.
- Höjden är inställbar 1110-1910mm (golv till krokar).
- Femhjulig stativfot, diameter 560mm. Pulverlackerad med RAL 9006.
- 5 länkhjul varav 2 låsbara, diameter 75mm.
- Vikt: 6,5kg.



Monteringsanvisningar

Hemsjukvårdstativ Nina Art nr 1016

Uppackning

Stativet levereras i 2 delar med droppstång monterad i stolpen samt med hjulen monterade på foten.

Montering

Sätt nedre stolpen i fotens låshylsa och dra fast med korsvredet.

Klart!



Anvisningar för handhavande

Hemsjukvårdstativ Nina Art nr 1016

Användning

Användningsområde

Artikel nr 1016 är ett stativ som är avsett att användas inom hemsjukvården och kunna bära droppåsar alternativt droppflaskor.

Höjjustering

Höjjustering sker genom att öppna vredet, ta tag i droppstängens och justera den till önskad nivå varefter korsvredet dras åt igen.

Förflyttning

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.

Låsning

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

MAX belastningar

Påsar/flaskor på krona: 3kg

Nedre stolpe: 1kg

Underhåll

Funktionskontroll (minst en gång per år)

Kontrollera att krokar för droppåsar sitter fast.

Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.

Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen.

Kontrollera låsningen för höjjustering av droppstängens.

Rengöring

Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.



Riskhantering

Hemsjukvårdstativ Nina Art nr 1016

För att identifiera möjliga risker i användningen av stativ och att åtgärda dessa risker i möjligaste mån upprättar Johlins riskanalyser och genomför stabilitetstester för samtliga modeller av stativ.

Riskanalys & stabilitetstest

Testförfarande

Stativet förses med *minst* den belastning det är avsett för i form av droppåsar och infusionspumpar. Stativet placeras på en platta med 10 graders lutning. Höjden från golv till krokar är 2 meter om inte annat specifikt anges.



Bilder av testutrustning och förfarande.

Stabilitetstest

Hemsjukvårdstativ Nina Art nr 1016

Grundförutsättningar

- Stativet är placerat på ett lutande plan på 10 grader.
- Avstånd från golv till fästen för infusionspårar = 2 000mm.
- 3st natriumkloridpåsar, vikt per st 1kg.

Testresultat

Inga tendenser till att stativet skulle tippa.

Registreringsuppgifter hos Läkemedelsverket:

PIDProduct: 55774 Infusionsstativ
Artikelnr: 1016
Produktklass: MDR Klass 1
GMDN: 40509



Märkning & spårbarhet

Hemsjukvårdstativ Nina Art nr 1016

CE - etiketten innehåller artikelnummer / -namn, tillverkningsdatum, våra kontaktuppgifter samt uppgifter om maxbelastningar.

Strekkod-etiketten innehåller även UDI/Batch-nummer.