



Produktdokumentation

APPARATSTATIV "SARA"

Artikel nr 1012

Innehållsförteckning

- 3 Allmän produktbeskrivning
- 4 Monteringsanvisning
- 5 Anvisningar för handhavande
 - Användning
 - MAX belastning
 - Underhåll
- 6 Riskhantering
 - Riskanalys
 - Stabilitetstest
- 7 Märkning och spårbarhet
- 7 Kontaktuppgifter

Inledning

Tack för att ni köpt stativ från Johlins!

Denna produktdokumentation innehåller den information som behövs för att montera, använda och underhålla ert nya stativ.

Läs därför igenom dokumentationen noggrant innan stativet tas i bruk, detta för att undvika onödiga misstag vid montering och handhavande.

Även om infusionsstativ anses vara produkter som inte är förenade med några speciella risker ska ändå hänsyn tas till de risker som pekas på i riskanalysen.

Johlins stativ har 3 års garanti förutsatt att anvisningarna för montering och handhavande följts och ingen yttre åverkan förekommit.

Allmän produktbeskrivning

Apparatstativ Sara Art nr 1012

- Infusionsstativ för racksystem och droppåsar.
- Fyra inåtböjda säkra krokar för droppåsar.
- Droppstång av rostfritt material diameter 19mm.
- Höjden är justerbar 1470-2500mm (golv till krokar).
- Nedre stolpe, diameter 30mm, är rostfri.
- Femhjulig stativfot med basdiameter 650mm och 3 förlängda ben för extra stabilitet.
- Hjul: 5st diameter 75mm, varav 2st låsbara.
- Standardfärger: ljusgrön RAL 6019 alt vit RAL 9010.
- Annan färg mot en kostnad.
- Vikt: 12kg



Monteringsanvisningar

Apparatstativ Sara Art nr 1012

Uppackning

Stativet levereras i 2 delar med krona och droppstång monterade på stolpen samt med hjulen monterade på foten.

Steg 1


Sätt ner stolpen i stativfoten.

OBS! Det är viktigt att stolpen bottenar i fotens låshylsa.

Steg 2

Lås fast stolpen på foten genom att dra åt låshylsans skruv med medföljande insexnyckel.

Klart!

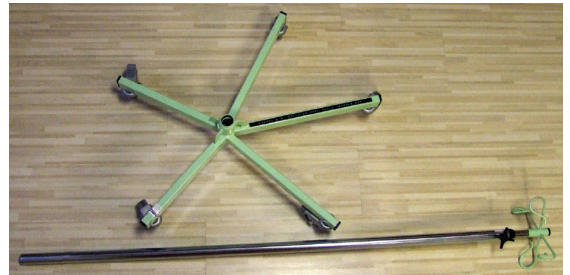

Anvisningar för handhavande

Apparatstativ Sara Art nr 1012

Användning

Användningsområde

Artikel nr 1012 är ett stativ som är avsett att bära rackmonterade pumpar och droppåsar/flaskor.

Bestyckning

Montera pumpracken på stativets nedre stolpe vänd mot stativfotens längsta ben.

Höjjustering

Håll i övre stängeln och öppna korsvredet när du vill justera höjden, lås därefter med korsvredet.

Förflyttning

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.

Låsning

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

MAX belastningar

Apparater på stolpe: 20kg

Påsar/flaskor på krona: 3kg

Underhåll

Funktionskontroll (minst en gång per år)

Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.

Kontrollera att krokar för droppåsar sitter fast.

Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.

Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen.

Kontrollera låsningen för höjjustering av droppstången.

Rengöring

Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.



Riskhantering

Apparatstativ Sara Art nr 1012

För att identifiera möjliga risker i användningen av stativ och att åtgärda dessa risker i möjligaste mån upprättar Johlins riskanalyser och genomför stabilitetstester för samtliga modeller av stativ.

Riskanalys & stabilitetstest

Testförfarande

Stativet förses med *minst* den belastning det är avsett för i form av droppåsar och infusionspumpar. Stativet placeras på en platta med 10 graders lutning. Höjden från golv till krokar är 2 meter om inte annat specifikt anges.



Bilder av testutrustning och förfarande.

Stabilitetstest

Apparatstativ Sara Art nr 1012

Grundförutsättningar

- Stativet är placerat på ett lutande plan på 10 grader.
- Avstånd från golv till fästen för infusionspår = 2 000mm.
- 3st natriumkloridpåsar, vikt per st 1kg.
- 6st pumpar varav 4 rackmonterade.
- 1st tillbehörskorg.

Testresultat

Inga tendenser till att stativet skulle tippa.

Registreringsuppgifter hos Läkemedelsverket:

PIDProduct: 55779 Infusionsstativ

Artikelnr: 1012

Produktklass: MDR Klass 1

GMDN: 40509

Märkning & spårbarhet

Apparatstativ Sara Art nr 1012

CE - etiketten innehåller artikelnummer / -namn, tillverkningsdatum, våra kontaktuppgifter samt uppgifter om maxbelastningar.

Strekkod-etiketten innehåller även UDI/Batch-nummer.

