



Produktdokumentation

APPARATSTATIV "SOFIE"

Artikel nr 1005

Innehållsförteckning

- 3 Allmän produktbeskrivning
- 4 Monteringsanvisning
- 5 Anvisningar för handhavande
 - Användning
 - MAX belastning
 - Underhåll
- 6 Riskhantering
 - Riskanalys
 - Stabilitetstest
- 7 Märkning och spårbarhet
- 7 Kontaktuppgifter

Inledning

Tack för att ni köpt stativ från Johlins!

Denna produktdokumentation innehåller den information som behövs för att montera, använda och underhålla ert nya stativ.

Läs därför igenom dokumentationen noggrant innan stativet tas i bruk, detta för att undvika onödiga misstag vid montering och handhavande.

Även om infusionsstativ anses vara produkter som inte är förenade med några speciella risker ska ändå hänsyn tas till de risker som pekas på i riskanalysen.

Johlins stativ har 3 års garanti förutsatt att anvisningarna för montering och handhavande följts och ingen yttre åverkan förekommit.

Allmän produktbeskrivning

Apparatstativ Sofie Art nr 1005

- Infusionsstativ för upp till sex pumpar/aggregat och droppåsar.
- Fyra inåtböjda säkra krokar för droppåsar.
- Nedre stång rostfri. Diameter 30mm.
- Bygelfästen diameter 25mm.
- Rostfri droppstång diameter 19mm.
- Höjden är inställbar 1470-2500mm (golv till krokar).
- Bygel och styrhandtag reglerbara i höjddled.
- Fäste för kontaktdosa.
- Femhjulig stativfot med diameter 650mm, ger bra stabilitet.
- Lätt rullande länkhjul med en diameter av 75mm.
- Låg stativfot som kan skjutas in under sängen.
- Två låsbara hjul.
- Hjulen har plåttrådsskydd som skyddar navet från smuts.
- Vikt 15kg.
- Miljövänlig ytbehandling.
- Målade ytor är pulverlackerade, finns i färg ljusgrön RAL 6019 alt vit RAL 9010.
- Annan färg mot en kostnad.



Monteringsanvisningar

Apparatstativ Sofie Art nr 1005

Uppackning

Stativet levereras i 2 förpackningar. Krona och droppstång monterade på stolpen samt med hjulen monterade på foten.

Steg 1

Trä bygelfästet på stolpen till hälften.

Steg 2

Trä därefter styrhandtagets fästhylsa på stolpen. Skjuv ner stolpen genom bygelfästets nedre fäste.

Steg 3

Trä på kontaktdosefästet med "taket" vänt uppåt.

Steg 4




Sätt ner stolpen i stativfoten.

OBS! Det är viktigt att stolpen bottnar i fotens låshylsa.

Steg 5

Lås fast stolpen på foten genom att dra åt låshylsans skruv med medföljande insexnyckel. Justera höjderna på bygelfäste, styrhandtag och kontaktdosefäste och dra åt fästhylsorna för respektive del.

Klart!

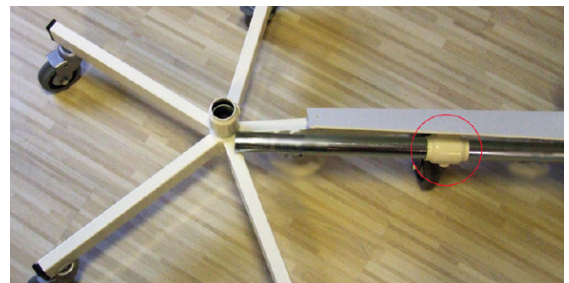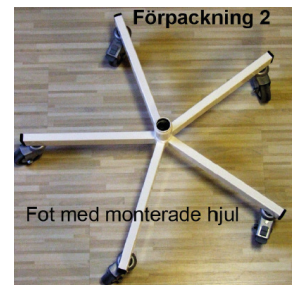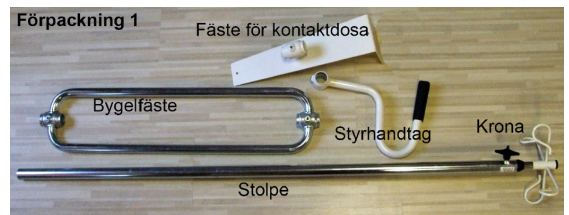

Anvisningar för handhavande

Apparatstativ Sofie Art nr 1005

Användning

Användningsområde

Artikel nr 1005 är ett stativ som är avsett att bära apparater och droppåsar/flaskor.

Bestyckning

Montera pumpar och andra typer av apparater på stativets bygelfäste, börja bestyckningen nerifrån med tyngsta enheten längst ner. Fördela flera pumpar växelvis på bygelfästena.

Höjjustering droppstång

Håll i övre stängningen och öppna korsvredet när du vill justera höjden, lås därefter med korsvredet.

Förflyttning

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.

Låsning

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

MAX belastningar

Apparater på stolpe: 20kg

Påsar/flaskor på krona: 3kg

Underhåll

Funktionskontroll (minst en gång per år)

Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.

Kontrollera att fästhylsorna för bygelfästet är åtdragna.

Kontrollera att fästhylsan för kontaktdosefästet är åtdragen.

Kontrollera att krokarna för droppåsar sitter fast.

Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.

Kontrollera låsfunktionen på de låsbara hjulen.

Kontrollera låsningen för höjjustering av droppstången.

Rengöring

Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.



Riskhantering

Apparatstativ Sofie Art nr 1005

För att identifiera möjliga risker i användningen av stativ och att åtgärda dessa risker i möjligaste mån upprättar Johlins riskanalyser och genomför stabilitetstester för samtliga modeller av stativ.

Riskanalys & stabilitetstest

Testförfarande

Stativet förses med *minst* den belastning det är avsett för i form av droppåsar och infusionspumpar. Stativet placeras på en platta med 10 graders lutning. Höjden från golv till krokar är 2 meter om inte annat specifikt anges.



Bilder av testutrustning och förfarande.

Stabilitetstest

Apparatstativ Sofie Art nr 1005

Grundförutsättningar

- Stativet är placerat på ett lutande plan på 10 grader.
- Avstånd från golv till fästen för infusionspåsar = 2 000mm.
- 3st natriumkloridpåsar, vikt per st 1kg.
- 6st pumpar/aggreat.

Testresultat

Inga tendenser till att stativet skulle tippa.

Registreringsuppgifter hos Läkemedelsverket:

PIDProduct: 26591 Infusionsstativ

Artikelnr: 1005

Produktklass: MDR Klass 1

GMDN: 40509



Märkning & spårbarhet

Apparatstativ Sofie Art nr 1005

CE - etiketten innehåller artikelnummer / -namn, tillverkningsdatum, våra kontaktuppgifter samt uppgifter om maxbelastningar.

Streckkod-etiketten innehåller även UDI/Batch-nummer.