

**PRODUKTDOKUMENTATION**  
Specialstativ för V-drän "Patrik"  
Artikel nr 1038



## **Innehållsförteckning**

- 1. Inledning**
- 2. Allmän produktbeskrivning, specifikation**
- 3. Monteringsanvisning**
- 4. Handhavande**
  - Användning
  - Underhåll
- 5. Riskhantering**
  - Riskanalys
  - Tester
- 6. Märkning på produkten**
- 7. Försäkran om överensstämmelse**
- 8. Kontaktuppgifter**

### **1. Inledning**

Tack för att ni köpt stativ från Johlins!

Denna produktdokumentation innehåller den information som behövs för att montera, använda och underhålla ert nya stativ.

Läs därför igenom dokumentationen noggrant innan stativet tas i bruk, detta för att undvika onödiga misstag vid montering och handhavande.

Även om sjukvårdstativstativ anses vara produkter som inte är förenade med några speciella risker ska ändå hänsyn tas till de risker som pekas på i riskanalysen.

Johlins stativ har 3 års garanti förutsatt att anvisningarna för montering och handhavande följts och ingen yttre åverkan förekommit.

## 2. Allmän produktbeskrivning / specifikation

### Specialstativ Patrik Art nr 1038

- Detta stativ är endast avsett för montering / justering av ventrikeldränage.
- Stolpe dia 30 mm för montage av apparater
- Material stolpe rostfritt stål.
- Femhjulig stativfot med en diameter av 650 mm, ger bra stabilitet.
- Lätt rullande länkhjul med en diameter av 75 mm.
- Låg stativfot.
- Två låsbara hjul.
- Målade ytor är pulverlackerade, i RAL 9010.
- Andra färger mot förfrågan.
- Vikt 12,2 kg



### 3. Monteringsanvisning

Specialstativ Patrik Art nr 1038

#### Uppackning

Stativet levereras i 2 delar, stolpe och fot med hjulen monterade.

#### Steg 1

Sätt ner stolpen i stativfoten.  
OBS! Det är viktigt att stolpen  
bottnar i fotens låshylsa.



#### Steg 2

Lås fast stolpen på foten ge-  
nom att dra åt låshylsans  
skruv med medföljande in-  
sexnyckel.

**Klart!**



## 4 Anvisningar för handhavande

### Specialstativ Patrik Art nr 1038

#### 4.1 Användning:

- **Användningsområde**


Detta stativ är endast avsett för montering / justering av ventrikeldränage.

- **Förflyttning**

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning.

- **Låsning**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

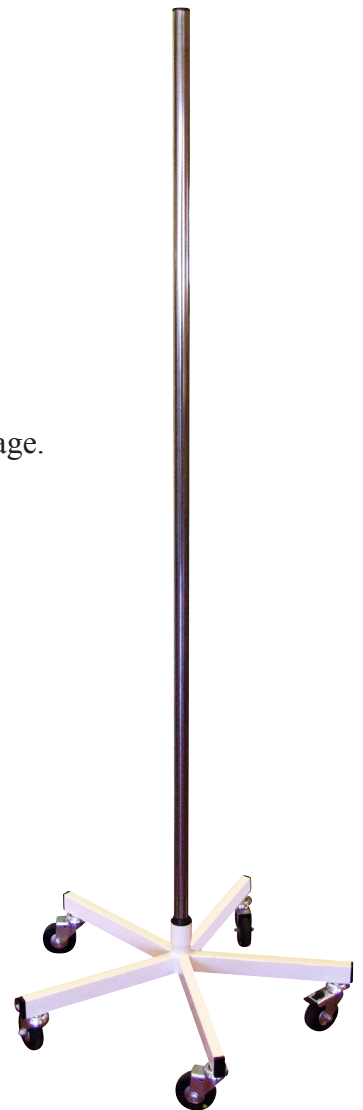

## 4 Anvisningar för handhavande (forts.)

### Specialstativ Patrik Art nr 1038

#### 4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**  
Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.  
Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.  
Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen
- **Rengöring**  
Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.



## 5. Riskhantering

### Specialstativ Patrik Art nr 1038

#### 5.1 Riskanalys


Riskanalys upprättas baserat på ett bedömningsunderlag enl. **bilaga 1**.

Riskanalys gjord för detta stativ framgår av **bilaga 2**.

## 6. Märkning på produkten

CE - etiketten innehåller artikelnummer / -namn, tillverkningsdatum, våra kontaktuppgifter samt uppgifter om maxbelastning.

### Exempel:

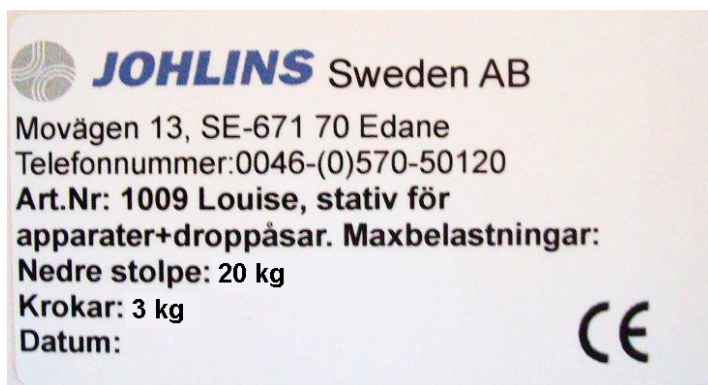

## 7. Försäkran om överensstämmelse

Specialstativ Patrik Art nr 1038

### EG-försäkran om överensstämmelse

Typ av produkt: Sjukvårdstativ  
Fabrikat: Johlins Sweden AB  
Varumärke: Johlins

Tillverkare: Johlins Sweden AB  
Movägen 13  
671 70 Edane

Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten överensstämmer med följande föreskrifter och lagar:

- LVFS 2003:11 “Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter”
- Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

Edane 17.05.10



Stefan Höiseth

Verkställande direktör

## **8. Kontaktuppgifter**

**Johlins Sweden AB  
Movägen 13  
671 70 Edane  
Sweden**

**Tel: 0570 501 20**

**Fax: 0570 501 43**

**E-post: [info@johlins.se](mailto:info@johlins.se)**

**Webb: [www.johlins.se](http://www.johlins.se)**