

PRODUKTDOKUMENTATION

Apparatstativ "Astrid"

Artikel nr 1017

"Barnstativet"



Infusionsstativ

Apparatstativ

Astrid Art nr 1017, produktbeskrivning

- Apparatstativ för upp till tre pumpar/aggreat och droppåsar
- Träskiva på foten för barn (max 30 kg) att sitta på.
- Fyra inåtböjda säkra krokar för droppåsar.
- Rostfri droppstång justeras enkelt med Johlin-Hylsan.
- Höjdjustering är 147-250 cm (golv till krokar).
- Stolpe för upp till tre pumpar/aggreat.
- Stolpen är elförzinkad.
- Femhjulig stativfot med diameter 650 mm ger bra stabilitet.
- Låg stativfot.
- Lätt rullande länkhjul med en diameter av 75 mm.
- Styrhandtag reglerbart i höjddled, så att vuxen enkelt kan köra stativet.
- Två låsbara hjul.
- Hjulen har plåtrådsskydd som skyddar navet från smuts.
- Miljövänlig ytbehandling.
- Målade ytor är pulverlackerade, i färg ljusgrön RAL 6019 el. vit RAL 9010.
- Andra färger mot förfrågan.
- HDS-skivan är sprutlackerad i vitt RAL 9010 med våtlack. Mått dia 650 x 17 mm.
- CE-märkt.
- Tillbehör finns.



Infusionsstativ

Apparatstativ

Astrid Art nr 1017, måttskiss

För måttuppgifter: se produktbeskrivning

Max belastning på platta 30 kg



Infusionsstativ


Apparatstativ

Astrid Art nr 1017, monteringsanvisning

Styrhandtaget skall föras upp på nedre stolpe med svarta bussningen uppåt.

Montera nedre stolpe i fotens hylsa. Lås fast med insexnyckeln.

Styrhandtaget justeras till lämplig höjd och låses med korsvredet.

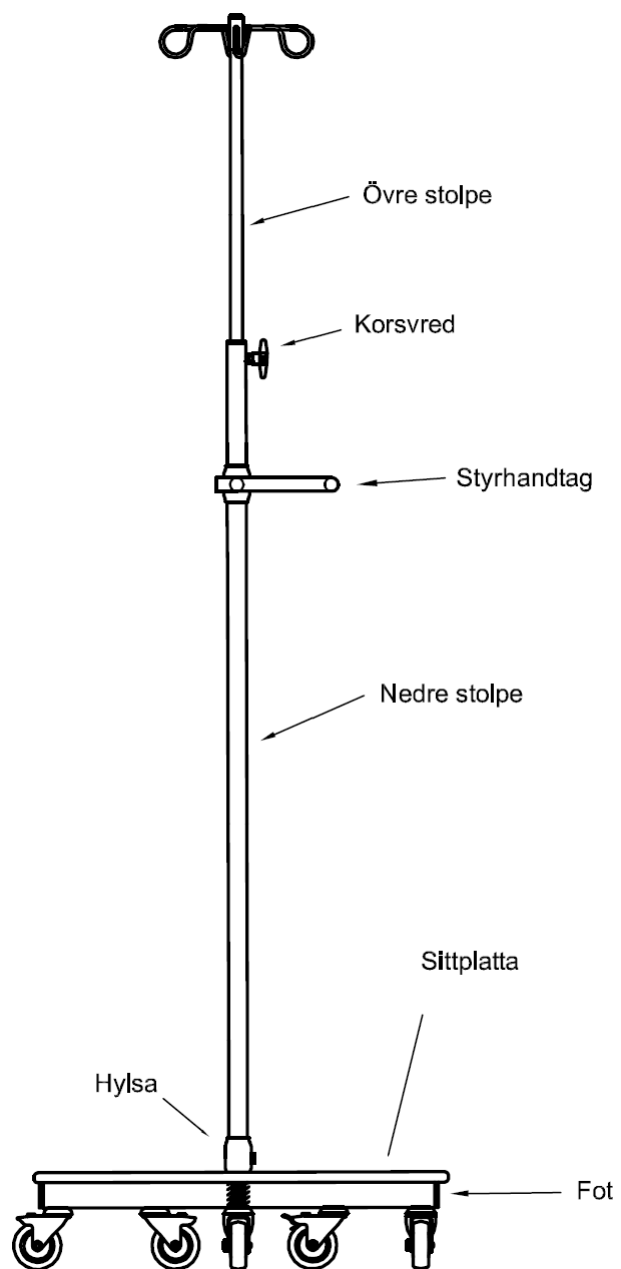

Infusionsstativ

Apparatstativ

Astrid Art nr 1017, bruksanvisning

- **Användning**

Artikel nr 1017 är ett stativ som är avsett att bära upp till tre pumpar / aggregat och droppåsar/-flaskor

- **Bestyckning**

Montera pumpar / aggregat på stativets nedre stång.

- **Höjdjustering**

Håll i övre stången och öppna korsvredet när du vill justera höjden, lås därefter med korsvredet.

- **Förflyttning**

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig

- **Låsning**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

- **Rengöring**

-Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt rengöringsmedel.

-Intervallet mellan rengöringstillfällena är avhängigt av användningsområdet.

-Rengöring görs med ett bakteriedödande medel, t.ex. Vircon eller liknande.



Stabilitetstest

Inledning

Johlins Sweden AB testar samtliga sina modeller av infusions- och apparatstativ för att tillmötesgå sjukvården krav och uppfylla kraven enligt SS EN 60601-1, pkt 24, stabilitet.

Testförfarande

Stativet förses med *minst* den belastning det är avsett för i form av droppåsar och infusionspumpar. Stativet placeras på en platta med 10 graders lutning. Höjden från golv till krokar är 2 meter om inte annat specifikt anges.



Bilder av testutrustning
och -förfarande



Infusionsstativ

Apparatstativ

Astrid Art nr 1017, stabilitetstest

Grundförutsättningar

- Stativet är placerat på ett lutande plan på 10 grader
- Avstånd från golv till fästen för infusionspår = 2 000 mm
- 4 st natriumkloridpåsar, vikt per st 1 kg
- 3 st pumpar / aggregat



Testresultat

Inga tendenser till att stativet skulle tippa.

Registreringsuppgifter hos Läkemedelsverket:

PIDProduct: 35735 Infusionsstativ

Artikelnr: 1017

Produktklass: MD, Klass 1

GMDN: 40509